

**УТВЕРЖДЕНА**  
Приказом председателя  
Комитета фармации  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан  
от « 13 » 07 2018 г.  
№ N015965

**Инструкция  
по применению изделия медицинского назначения**

**Название изделия медицинского назначения**

**ХИЛО-КОМОД**, капли для глаз во флаконе по 10 мл

**Состав и описание изделия**

1 мл капле для глаз ХИЛО-КОМОД содержит:  
натрия гиалуронат – 1 мг, цитратный буферный раствор, сорбит, воду.

ХИЛО-КОМОД – это стерильный, не содержащий консервантов и фосфатов раствор, предназначенный для офтальмологического применения.

ХИЛО-КОМОД содержит натриевую соль гиалуроновой кислоты (натрия гиалуронат), которая физиологически присутствует в тканях глаза и других органах человека. Натрия гиалуронат обладает уникальными свойствами, позволяющими ему образовывать однородную и стойкую к смыванию лубрицирующую пленку на поверхности глаза. За счет этого продлевается увлажняющий эффект капель, не сопровождающийся ухудшением остроты зрения. Лубрицирующая пленка защищает поверхность глаза от негативного воздействия окружающей среды (при работе в помещениях с кондиционированным воздухом и во время интенсивной работы за компьютером), а также способствует заживлению поверхностных тканей глаза после хирургических процедур или при неглубоких ранах.

Капли ХИЛО-КОМОД помещены в специальный непроницаемый для воздуха контейнер системы «КОМОД», который гарантирует стерильность содержимого флакона и обеспечивает извлечение одинаковых по размеру капель.

**Область применения**

- для увлажнения роговицы и конъюнктивы и симптоматического лечения сухости глаз (синдрома «сухих глаз»), а также после офтальмологических хирургических процедур

**Способ применения**

Закапывать по 1 капле 3 раза в день в конъюнктивный мешок каждого глаза. При необходимости частоту закапываний можно увеличить. Частота применения устанавливается индивидуально на основании рекомендаций врача-офтальмолога. Значительное увеличение частоты закапывания капель ХИЛО-КОМОД (например, свыше 10 раз в сутки) разрешается проводить по решению и под наблюдением врача-офтальмолога.


Капли ХИЛО-КОМОД можно применять при ношении жестких или мягких контактных линз. В этом случае применение капель облегчает ношение контактных линз и позволяет сделать его более комфортным.

Поскольку капли ХИЛО-КОМОД не содержат консервантов, они пригодны для длительного применения.


Контейнер «КОМОД» предназначен для высвобождения 10 мл раствора, что соответствует приблизительно 300 каплям. По техническим причинам в конце использования во флаконе остается небольшое количество капель. Флакон с каплями ХИЛО-КОМОД предназначен для индивидуального использования.

### ***Рекомендации по применению капель для глаз ХИЛО-КОМОД***


Капли ХИЛО-КОМОД можно использовать только при наличии неповрежденной этикетки контроля первого вскрытия на картонной коробке перед первым использованием.

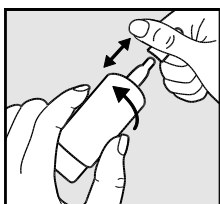


Перед применением снимите колпачок с флакона. Для этого держите колпачок одной рукой, а другой потяните за флакон с помощью вращательного движения. Перед первым применением переверните флакон ХИЛО-КОМОД наконечником вниз и нажимайте на дно контейнера до тех пор, пока из отверстия наконечника не появится первая капля. Сейчас контейнер готов к последующему использованию.

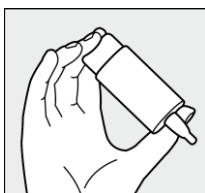


Удерживайте контейнер вверх дном, держа большим пальцем за выступ флакона и остальными пальцами – за дно контейнера.

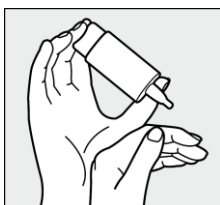

Поддерживайте руку, держащую флакон, другой рукой, как показано на рисунке.

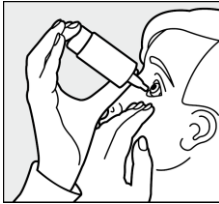

Немного наклоните голову назад, осторожно оттяните нижнее веко и сильным и быстрым движением нажмите на дно контейнера. Это активирует механизм для высвобождения **одной** капли. Благодаря специальному клапану системы «КОМОД», размер и скорость высвобождения капель будут одинаковыми, независимо от того, какая сила была приложена ко дну контейнера. Медленно закройте глаза для того, чтобы жидкость равномерно распределилась по поверхности глаза.

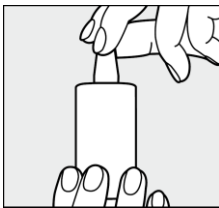

Сразу после использования закройте флакон колпачком. Убедитесь, что наконечник капельницы сухой.

Во время закапывания избегайте какого-либо контакта наконечника флакона с глазами или кожей.

### **Побочные действия**

Поскольку капли ХИЛО-КОМОД не содержат консервантов, они хорошо переносятся даже при длительном применении. Кроме того, ХИЛО-КОМОД не содержит фосфатов, что позволяет избежать возможных осложнений из-за образования нерастворимых отложений на роговице.

Сообщалось о крайне редких случаях реакций гиперчувствительности, таких как жжение или избыточное слезотечение, которые исчезали сразу после прекращения применения капель ХИЛО-КОМОД.

### **Противопоказания**

- гиперчувствительность к любому из компонентов глазных капель

### **Особые указания**

В случае одновременного применения других офтальмологических лекарственных препаратов следует выдерживать, по меньшей мере, 30-минутный интервал, причем ХИЛО-КОМОД **всегда** нужно закапывать в последнюю очередь. Однако, глазные мази всегда следует наносить **после** закапывания капель ХИЛО-КОМОД.

Для того, чтобы избежать развития реакций несовместимости, обусловленных взаимодействием между продуктами по уходу за контактными линзами и каплями ХИЛО-КОМОД, рекомендуется не закапывать ХИЛО-КОМОД в течение 30 минут после закладывания контактных линз.

Согласно современным данным ХИЛО-КОМОД можно применять детям, беременным и кормящим грудью женщинам.

### **Условия хранения**

Хранить при комнатной температуре (не выше 25 °С).

Хранить в местах, недоступных для детей!

### **Срок годности**

3 года

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке (🕒).

Срок годности после первого использования – 6 месяцев при хранении при комнатной температуре (не выше 25 °С).

### **Наименование, юридический адрес организации-производителя изделия медицинского назначения, адрес местонахождения производства**



УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ

Индустриештрассе 35, 66129 Саарбрюкен, Германия



|         |
|---------|
| STERILE |
|---------|

|   |
|---|
| A |
|---|

***Наименование, адрес и контактные данные организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству изделий медицинского назначения от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью изделий медицинского назначения:***

ТОО «Nova East Pharm Kazakhstan (Нова Ист Фарм Казахстан)»

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова 98, офис 507

Телефон: +7 (727) 221 90 91

E-mail: [office@eastpharm.eu](mailto:office@eastpharm.eu)